



making work easy



- FAQ - Deutsch
- FAQ - English
- FAQ - Français
- FAQ - Italiano
- FAQ - Español
- FAQ - Português
- FAQ - Türkçe
- FAQ - Русский
- FAQ - Polski
- FAQ - Čeština
- FAQ - 中文
- FAQ - 日本語
- FAQ - 한국어
- FAQ - اللغة العربية

SILENT compactCAM

FAQ - frequently asked questions

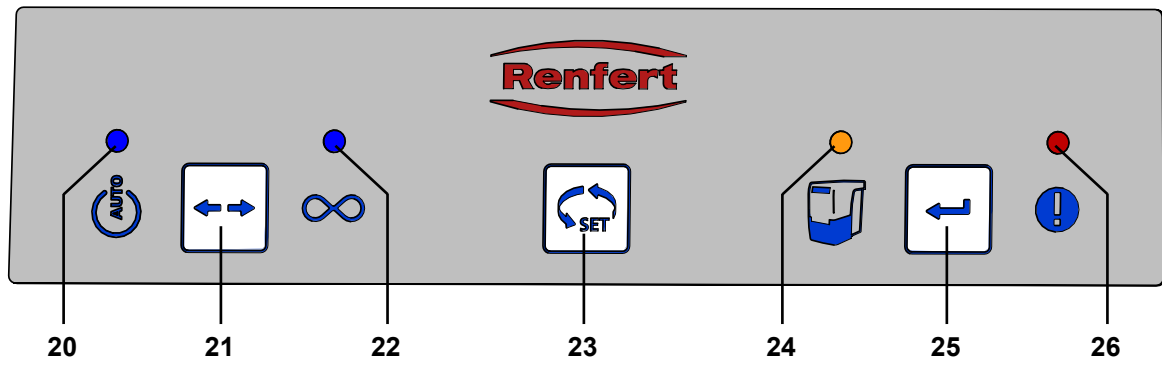


Fig. 1 / 2

FAQ - 한국어

i 작동 구성품에 관한 정보는 본 문서의 "[그림 1](#)"과 "[그림 2](#)"를 참조하십시오.

i 장의 표시 사항은 인터넷으로 전체 사용설명서를 참조하십시오.

문제	원인	해결방법
오류 메시지가(26, 그림 2)가 깜박입니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전자 장치가 너무 뜨겁습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 장치를 끄고 냉각시킵니다. 다음과 같은 방식으로 적절한 냉각을 실시합니다. <ul style="list-style-type: none"> - 설치 안내서 4.2장 참조. - 외부 환기(4.6장 참조). - 미립자 필터 교체.
흡입 성능이 충분하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 흡입관에 막힘이나 누출이 있습니다. 분진 서랍이 밀폐되지 않았습니다. 미립자 필터가 가득 찼습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 흡입관을 확인하십시오. 4.4장의 포인트를 관찰하십시오. 분진 서랍이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오 (6.2장 참조). 장치를 껐다가 다시 켜서 필터 청소 기능을 시작합니다. 미립자 필터를 교체합니다(6.3장 참조).
분진 서랍이 넘치도록 찻 습니다.	<ul style="list-style-type: none"> “분진 서랍 비우기” 시간이 너무 높 게 설정되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 시간을 더 낮게 조정합니다(6.2.1장 참조).
분진 서랍이 완전히 차지 않았는데도 분진 서랍을 비우라는 신호가 표시됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> “분진 서랍 비우기” 시간이 너무 낮 게 설정되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 시간을 더 높게 조정합니다(6.2.1장 참조).
“분진 서랍 비우기” 디스플레이가 깜박이며 음향 신호가 3번 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 흡입 속도가 부족하여 필터 청소 기능이 실시됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 필터 청소가 끝날 때까지 기다리십시오.
오류 메시지에 불이 켜집니다(26, 그림 2).	<ul style="list-style-type: none"> 미립자 필터가 가득 차서 필터 청소 기능만으로 문제를 해결할 수 없습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 미립자 필터를 교체합니다(부속품 및 6.3장 참조).
오류 메시지에 불이 켜지고(26, 그림 2) 경고음이 다시 3번 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 미립자 필터가 가득 차서 필터 청소 기능만으로 문제를 해결할 수 없습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 미립자 필터를 교체합니다(부속품 및 6.3장 참조).
연속 작동 또는 자동 작동 중 석션 과정이 갑자기 멈추고 해당 디스플레이가 계속 유지됩니다(20 / 22, 그림 2).	<ul style="list-style-type: none"> 석션 터빈이 과열 상태입니다. 석션 터빈에 문제가 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 기기를 끄고 최소 60분 이상 회복시간을 두십시오. 석션 튜브가 막히지 않았는지 확인합니다. 튜브에 걸린 이물질을 제거하십시오. 기기를 껐다가 다시 켜서 필터 세척 동작이 작동할 수 있도록 합니다. (필터 세척 후에도 석션이 잘 되지 않을 경우) 극세 필터를 교체합니다(6.3장 참조). 석션 터빈을 교체합니다.
장치가 켜질 때 모든 디스플레이가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 켜지지 않는 디스플레이에 결함이 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> Renfert / 서비스로 문의하십시오.