



스팀 클리너 파워 스티머 1, 2 디스케일링 방법

주의사항

- ☑ 부식을 방지할 수 있는 석회질 제거 용액
“렌퍼트 파워 스티머 디스케일러”만 사용하세요.
- ☑ 구연산과 같은 기타 석회질 제거 용액은 장치를 손상시킬 수 있습니다.
- ☑ 주의 : 석회질 제거 용액은 부식을 일으킬 수 있습니다.
- ☑ 석회질을 제거하는 동안에는 보호 안경과 보호 장갑을 착용하세요.
- ☑ 석회질을 제거하는 동안 기기를 작동하지 마세요!
- ☑ 석회질 제거 전 과정 동안 주입구가 항상 열려 있어야 합니다.



단계별 사항

1. 장치의 전원을 끄고 열을 식히세요.
2. 물과 청소용 브러시로 압력 탱크를 헹구세요.
3. 주입구를 닫아주세요.
4. 압력 탱크에 물 1L를 채우고 파워 스티머에 디스케일러 용액 1L를 추가로 채워주세요.
5. 15분이 지난 후 물 0.6~0.8L를 추가하세요.
만약 거품이 발생한다면, 거품이 모두 가라앉은 후 용액을 채워주세요.
6. 디스케일러 용액은 가벼운 오염의 경우 2~4시간,
심한 오염의 경우 8~14시간 동안 방치해주세요.
7. 주입구를 열고 디스케일러 용액을 배출하세요.
8. 사용한 디스케일러 용액이 많이 희석된 경우라면,
폐수와 함께 폐기할 수 있습니다.
9. 압력 탱크를 물로 여러 번 헹구고 청소용 브러시로 청소하세요.



추가정보

사용 설명서 및 물질 안전보건자료, 관련 동영상 등 자세한 사항은 사이트를 참조하세요.



신구덴탈
www.shingoo.co.kr



영상보기