

저온 소성 포세레인 파우더

# CZR PRESS LF



Tissue



Internal Stain

**CZR PRESS LF Tissue** 포세레인은 840°C 정도의 낮은 소성 온도로 CZR 빌드업 후에도 영향을 주지 않고 작업이 가능하며, 글레이징과 동시에 작업이 가능합니다.

**CZR PRESS Internal Stain** 포세레인은 800°C 정도의 낮은 소성 온도로 선명한 색상 표현이 가능하고, 투명도가 높아 심미적 표현이 가능합니다.

CZR PRESS LF	건조시간 (분)	소성시작온도 (°C)	진공시작온도 (°C)	분당상승온도 (°C/분)	진공치 (cm/Hg)	진공해제온도 (°C)	최고온도 (°C)	계류 (분)	냉각시간 (분)
LF Tissue	7	600	600	45	72	840	840	1	4
LF Internal Stain	5	600	-	45	-	-	800	-	4




**CZR PRESS LF**  
**TISSUE 1~7 10g**

치은 부위 표현을 위한 파우더로 특히 풀지르코니아 적용에 추천합니다.  
7가지의 다양한 색상으로 파우더 선택의 폭이 넓습니다.



**Color guide**

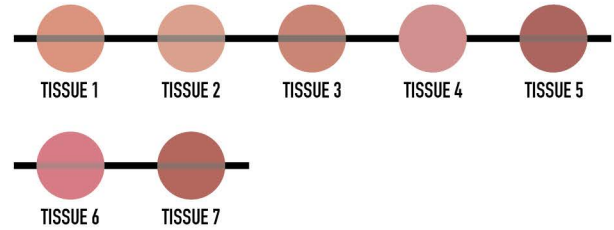

**CZR PRESS LF**  
**INTERNAL STAIN 3g**

박리 또는 기포 발생의 염려가 없으며, 다양한 색조 표현이 가능합니다.  
또한 형광성을 가지고 있어 자연스러운 표현이 가능합니다.

**\*CZR PRESS LF Internal Stain 적용**

CZR EXTERNAL STAIN E, FL,  
VC Glaze와 함께 적용하여  
캐릭터라이징을 표현합니다.

KATANA Zirconia에 스테인을 올려  
고급 심미 보철물을 제작합니다.



**Color guide**

