

Renfert

making work easy



# 심프로

교정 리테이너, 덴처 세척  
단 15분만에 깨끗하게

소개 영상 보기



신구덴탈

T 02-775-8855 www.shingoo.co.kr



치석까지 제거되는 완벽한 장치 세척기

# 심프로 (SYMPRO)



심프로는 덴처 및 교정 장치, 스프린트 등을 버튼 하나로 완벽하게 세척하는 고성능 세척 장비입니다. 장치 표면의 오염 물질인 치석과 착색물 등을 약 15분만에 깨끗하게 제거합니다.

## 장점

- 효율적이고 자동화된 세척과정으로 수동 방식에 비해 작업시간 약 80% 절약가능
- 심프로 미니컵과 템포러리 시멘트 제거액 템팩스를 같이 사용 시 보철물을 쉽게 세척할 수 있음
- 정기적인 관리와 세척으로 장치 유지관리가 용이함

심프로는 쉽고 간편한 작동법으로 원내에서도 빠르고 효과적인 작업을 통해 환자의 만족도를 높이고 효율적인 진료 시스템을 만들 수 있습니다.

## 교정장치

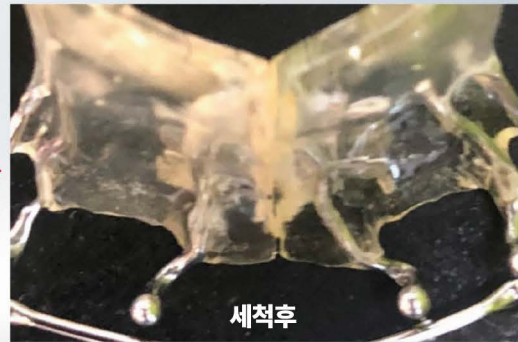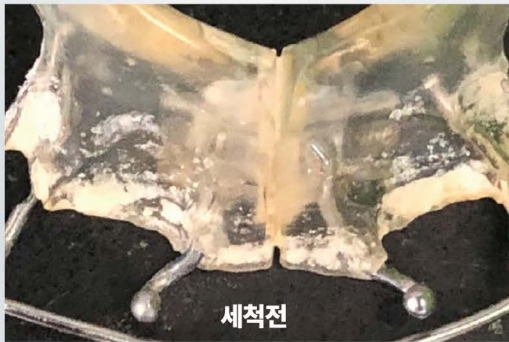

## 덴처




## 세척 원리

### 세척용 핀

- 핀이 회전하면서 화학작용을 촉진하도록 세척액을 45°C까지 가열시킵니다.
- 핀 끝이 정확하게 직각으로 꺾여 있어 장치에 손상을 주지 않고 오염을 부드럽게 제거할 수 있습니다.
- 내산성 합금 소재로 내구성이 뛰어나 반복사용이 가능합니다.

### 세척통

- 35°로 기울어진 각도는 장치를 세척액의 흐름과 반대 방향으로 움직이게 하고 세척핀에 중력을 가해 장치를 최적으로 세척할 수 있습니다.
- 세척통을 기구 소독액으로 세척하여 오염물을 제거하고 감염을 안전하게 방지할 수 있습니다.

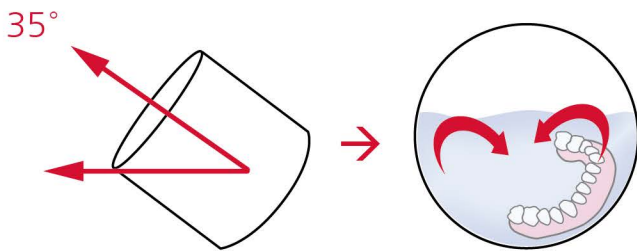

## 기술 정보

허용 메인 전압/주파수	100-240V, 50/60 Hz
소비 전력	90 VA
세척 강도	낮음 / 중간 / 높음
크기 (W × H × D)	150 × 240 × 280mm
무게 (비커제외)	약 3kg

## 주문 정보

심프로 (100~240V)	심프로, 트위저 1개, 세척 용기 뚜껑, 세척 후 처리 용기 및 뚜껑, 고정 마그넷, 세척용 핀	No. 6700-1000
미니컵 세트	미니컵 1개, 미니컵 링 1개, 세척용 핀 1통	No. 6500-0410
세척용 핀 (75g)		No. 6500-0550
비커		No. 6500-0450



1. 세척통에 세척핀을 넣습니다.



2. 세척통에 세척액을 넣습니다.



3. 세척통에 장치를 넣습니다.



4. 15분만에 세척이 완료됩니다.

**NEW** 덴처 세척기 심프로 전용 세척용액

# 헬팩스(help:ex)

대부분의 일상적인 치과재료에 호환이 입증된 성분으로 안전하게 세척할 수 있습니다.

## 장점

- 보통의 치과 재료로 제작한 보철장치, 교정장치, 스프린트 같은 데 붙어 있는 단단한 이물질을 쉽고 효과적으로 제거합니다.
- 쓰기 쉬운 세정액이 개개인의 얼룩에도 작용하여 효과적으로 제거합니다.
- 생태친화적인 세척파우더는 1회용 포장으로 되어 있고 중화제와 같이 사용합니다.

## 헬팩스 플라그 f (help:ex plaque f)

심프로 덴처 세척 장비 사용시 바로 넣어서 사용할 수 있는 산성 용액입니다. 치석과 플라그를 빠르고 확실하게 제거합니다.

## 헬팩스 플라그 p (help:ex plaque p)

일회용으로 개별 포장된 파우더를 심프로 덴처 세척기 사용시 물과 함께 섞습니다. 플라그와 치석 제거에 유용합니다. 중화제는 심프로를 다 사용하고 난 다음 중화제 파우더를 섞습니다.

## 헬팩스 디스컬러 f (help:ex discolor f)

담배나 커피 차로 인한 얼룩들을 효과적으로 제거하는 알칼리성 특별 제거액입니다.



장비와 알맞은 세척액으로 이루어진 시스템 솔루션



헬팩스 플라그P는 중화제를 이용해서 쉽게 폐기

개관	헬팩스 플라그 p	헬팩스 플라그 f	헬팩스 디스컬러 f
플라그/ 치석	■	■	
커피, 차, 타르			■
약한 오염	■		
심한 오염		■	■
중화 기능	■		
형태	가루	용액	용액

## 주문 정보

헬팩스 플라그 p	세척 파우더 20g × 20, 중화제 4.5g × 20	No. 67000000
헬팩스 플라그 f	4 × 1 L (4 × 34 floz)	No. 67000100
헬팩스 디스컬러 f	1 L (0.26 gal)	No. 67000200