

치과에서 필요한 일상적인 클리닝 작업을 빠르고 편하게



수작업 없이, 템포러리 시멘트를 제거하세요

Page 03

템팩스를 사용하여 보철물의 시멘트 잔여물을 쉽고, 확실하게, 보철물을 손상시키지 않으면서 제거할 수 있습니다.



덴처를 자동 세척하세요

Page 06

덴처 세척기 심프로는 덴처, 치과 교정장치 및 스프린트를 세척합니다. 효과적인 세척에 시간까지 절약할 수 있는 경제적인 세척기입니다.

덴처와 보철물 간편하게 세척합니다



렌퍼트는 고객의 일상적인 세척작업 과정을 간편하게 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 어떻게 업무가 진행되는지를 주의 깊게 물어보고 들었으며 이에 따른 요구사항을 파악하였습니다.

렌퍼트의 장비와 재료는 R&D부서 내에서만 이루어지는 것이 아니라, 매일 렌퍼트 제품을 사용하는 고객들과의 긴밀한 협력 하에 개발되었습니다.


템팩스 템포러리 시멘트 제거액

손이 아닌 제거액으로 템포러리 시멘트를 제거합니다

수작업 대신, 보철물을 세척액에 담고, 시멘트가 제거되는 동안 잠시 두세요. 세척된 보철물을 꺼내서 흐르는 물에 헹굽니다. 이 방법은 안전하고 보철물을 보호하며, 세척하는 동안 작업자가 다른 일을 할 수 있도록 해줍니다.



스케일러를
이용한
수작업

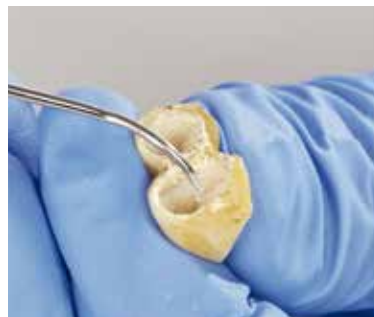

VS

템팩스로
제거



볼 안에 보철물을 넣고...

템팩스 용액에 10분간
담급니다.

신속하게 물로 헹구어
소독합니다.

> **작업 완료**

temp:ex

템포러리 시멘트 제거액

템팩스는 덴탈 템포러리* 시멘트 제거액입니다

*징크 옥사이드 베이스



“지금까지, 템포러리 시멘트 제거는 시간도 많이 걸리고, 항상 집중이 필요하기 때문에 짜증나는 작업이었습니다. 이제는 템팩스 덕분에, 진료 도중에 작업할 수 있죠. 나와 우리 직원들은 템포러리 시멘트를 제거할 동안에 환자들을 볼 수 있습니다.”

Dr. Sigmar Schnutenhaus

주문 정보

템팩스 (250ml)

6600-0000

관련 장비

심프로 (110~240V)

6500-0000

심프로 미니컵 세트

6500-0410

추가 정보


www.renfert.com/temp-ex

장점

- 손으로 직접 제거할 때보다 시간을 상당히 줄임으로써 작업시간을 절약할 수 있음
- 손으로 직접 제거 시 발생할 수 있는 인스트루먼트에 의한 보철물 손상을 피할 수 있음
- 징크 옥사이드 기반의 템포러리 시멘트는 모두 사용 가능함

세부사항

- 덴처 클리닝 장비인 심프로를 사용하면 최대 50% 빠르게 시멘트 제거가 가능함
- 체어사이드에서 작업 흐름이 최적화 됨
- 통에서 원하는 정량만 덜어낼 수 있기 때문에 경제적으로 사용 가능함

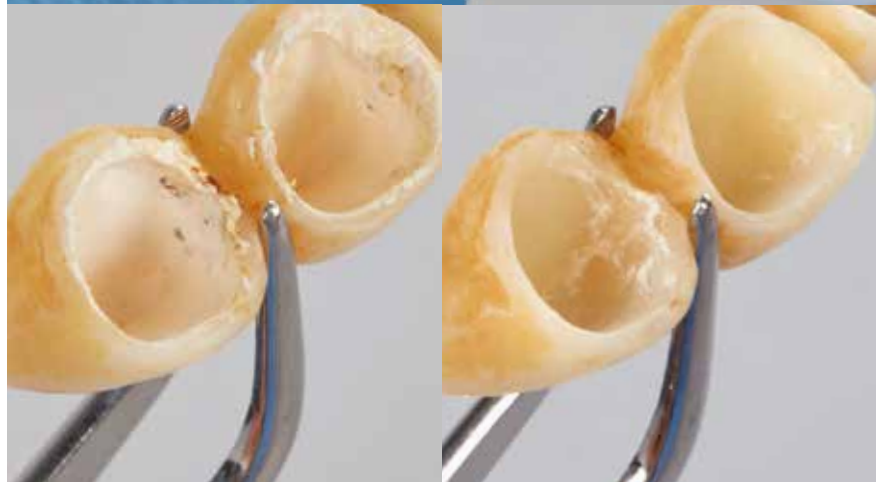


템팩스와 유사 경쟁 상품 비교

템포러리 시멘트 제거액의 세척 성능


템포러리 시멘트(유지놀 베이스)가 붙어있는 레진 코핑을 제거액에 담갔을 때 세척 성능

아래 표는 레진 코핑을 템팩스와 경쟁 상품에 담갔을 때 세척 성능을 보여줍니다.
샘플의 템포러리 시멘트 두께는 0.25mm입니다.

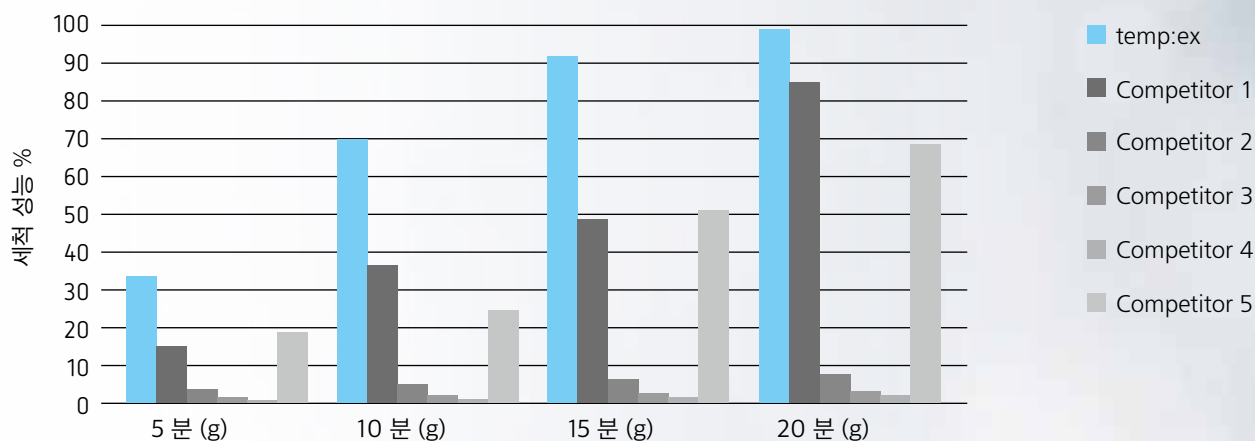

템포러리 시멘트(유지놀 베이스)가 붙어있는 레진 코핑을 덴처 세척 장비로 제거했을 때 세척 성능

아래 표는 심프로를 이용한 템팩스와 경쟁 상품의 레진 코핑 세척 성능을 보여줍니다.
샘플의 템포러리 시멘트 두께는 처음에 표준화된 절차에 따라 0.25mm입니다.

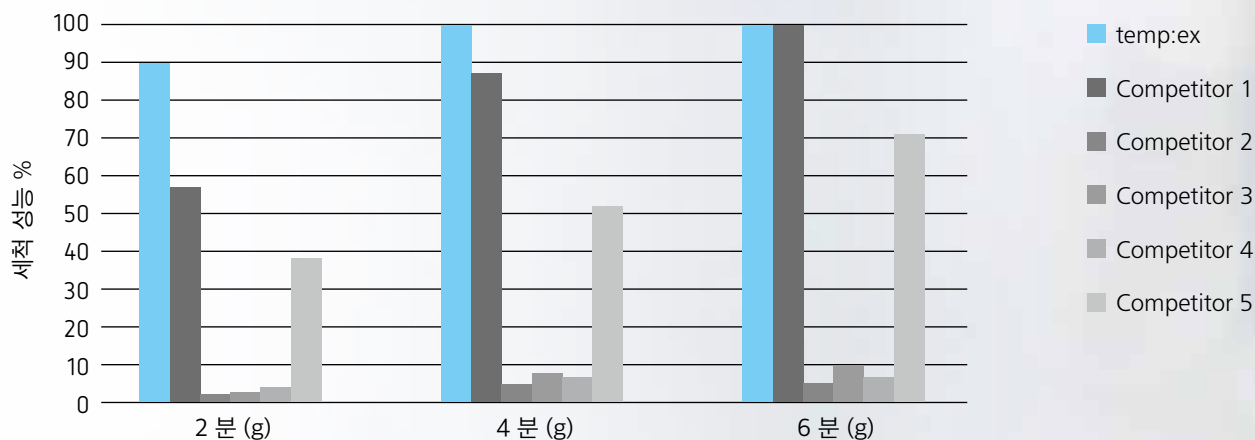

심프로 덴처 세척기

치과 진료시 덴처세척 서비스를

고객 일상 업무의 강력한 솔루션: 심프로로 덴처 세척을 효율적이고 수익성 있게 하세요. 콤팩트한 덴처 세척 장비는 최소한의 노력으로 빠르고 효과적인 덴처 질명 예방 서비스를 제공합니다.



심프로로 매우 간편한 덴처 세척

1

장비에 덴처와 용액을 넣고
시작 버튼을 누릅니다.



2

다른 업무를 보세요.



3

덴처를 제거하고, 행굽니다. 끝



‘일을 간편하게’ 팁:

- 사용 약세서리인 세척용 보울과 세척핀, 트위저는 재사용보증이기 때문에 고객이 위생적으로 심프로를 사용하는 데 불편함이 없습니다.



easy use




/	100-240 V, 50/60 Hz
	90 VA
	1200 / 1600 / 2000 1/min
(W x H x D)	150 x 240 x 280 mm
	3 kg

(100-240 V)	6500-0000
-------------	-----------

1	세척용 핀 (75 g)	6500-0550
2	심프로 유니버설 세척액 (2Lx2)	6500-0600
3	심프로 니코클린 세척액 (2Lx2)	6500-0610



추가 정보
www.renfert.com/sympro

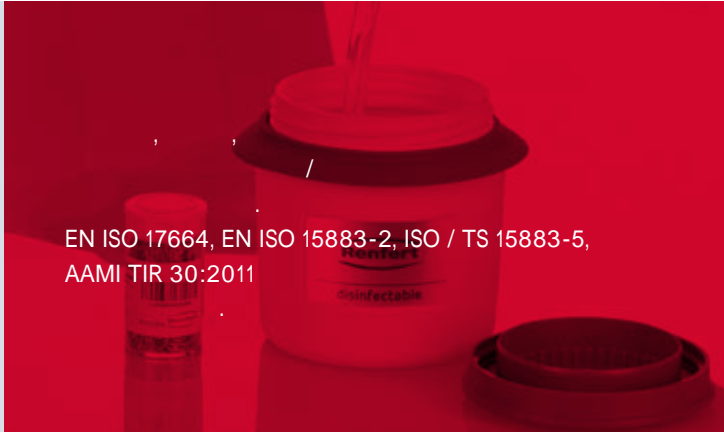

EN ISO 17664, EN ISO 15883-2, ISO / TS 15883-5,
 AAMI TIR 30:2011

- 80%
-
-
-
-
- 35°

덴처 세척기 **심프로** 사용기

덴처 세척 진짜로 자동으로 돼요

Christopher Tuxford (독일 치과의사) 사용기

2017년 가을 Stuttgart 치과전시회

“딱 찬 통로, 수많은 부스, 정보의 과부하! 모든 것들이 새롭고, 모든 것들은 훌륭했고, 모든 것이 비싼 가운데. 어떤 것이 내 눈을 사로잡았습니까.

작고, 화이트/그레이 색상의 보기에 간단한 장비였지만, 왠지 특별해 보였습니다. 그때서야 제가 렌퍼트 부스 앞에 서있다는 것을 깨달았습니다. 기공실에서 쓰는 장비네요! 난 치과의사인데! 이걸 뭐죠?

친절한 대답의 요점은 이것은 덴처 세척기 심프로로 진료 업무 중 추가적으로 또는 단독으로 사용한다는 내용이었죠. 괜찮네요! 기공실에 대체적으로 비슷한 것이 있어요. 덴처 세척에 2~3시간이 걸립니다. 하지만, 심프로는 새로워 보였죠. 그래서 저는 더 많은 정보를 요청했죠. 세척에 20~40분이 걸리고, 세척 후 폴리싱은 필요하지 않다고 했습니다. 와우! 그게 된다고요? 가격은 예상했던 것보다 저렴하더라고요.

장비가 올때까지 기다리는 동안, 저는 다른 사항을 물어봤고 답변들은 매우 긍정적이었습니다. 인터넷에 찾아보니 어떤 덴탈 테크니션은 심프로를 이용해서 양로원에 저렴한 가격으로 덴처 세척 서비스를 제공하자는 환상적인 아이디어를 내기도 했더라고요.

그리고 나서 처음으로 덴처 세척을 해봤죠. 덴처 상태에 따라 세척 시간이 20~40분 이내로 걸리는 것은 사실이었습니다. 기공실에서 덴처를 세척할 때와 비슷한 정도로 매우 깨끗하게 세척되더라고요. 환자가 진료실에서 진료 받는 동안 덴처 세척을 해주면 되겠다는 생각이 들었죠.

진료를 받으러 오는 환자의 약 80%가 덴처 세척 서비스를 받고 있습니다. 심프로 덴처 세척 서비스는 일상적인 진료 업무와 정말로 잘 결합되어 신뢰성 있게 제공되고 있습니다.”

2018년 3월

“얼마있다가, 우리는 몇 달 전 세척했던 덴처를 다시 받았습니다. **덴처에 미세한 마모를 발생시키는 침착물이 늘어나거나 하지는 않았습니**다. 게다가, 흡연으로 인해 심하게 변색된 덴처를 가진 환자들이 우리를 찾아와 직접 덴처 세척 서비스를 요청하기도 했습니다.

세척 전 덴처



20분 세척 후 덴처





참착물이 붙어있는 하악 덴처



20분 세척 후 하악 덴처



세척 전 단단한 침전물이 붙어 있는 상악 덴처



40분 세척 후 하악 덴처

양로원 거주자들의 덴처를 정기적으로 세척하는 데 심프로를 사용하려던 계획은 유통 문제로 현재 여전히 실행하지 못하고 있습니다. 필요성은 있지만, 이 비용을 지불할지는 두고 봐야 합니다.

2018년 가을

“1년이 지났습니다. 신규 환자를 제외하고 세척시간이 20분 이상 필요한 세척이 필요한 경우는 거의 없었습니다”

2018년 3월

“덴처 세척은 20분 미만의 시간이 걸리며, 전문적인 치아 세척에 걸리는 시간의 절반밖에 안 걸립니다. 양로원서도 새로 들어온 사람 1명을 제외하고는 똑같은 경험을 했습니다. 양로원을 방문하는 동안이면 늘상, 세척을 해달라는 덴처들이 항상 있었죠. 직원들은 예전 방식으로 덴처를 세척했고, 아마 꽤 괜찮게 되긴 는네 불행히도 덴처가 변형되거나 망가지더라구요. 친척들은 돈을 아끼려면 덴처를 기공소로 보내지 말아야 한다고 생각했죠. 마침내 변화의 시기가 온 거죠.”

2018년 3월

“수년간 쌓인 치석은 단단하게 붙어있어서, 일반적인 오염보다 세척시간이 훨씬 더 오래 걸렸습니다. 하지만, 결과는 매우 훌륭했습니다. 손으로 세척하지 않는 심프로 덴처 세척 서비스로 30유로를 벌었습니다. 렌퍼트가 줬던 영수증 발행용 샘플이 정말 유용했습니다.”

2018년 3월

“덴처 세척기 심프로를 도입한 것은 매우 성공적이었다고 말할 수 있겠습니다.”



Renfert

일을 간편하게



효율적인 재료와 장비를 사용하여 최고의 업무 효율과 이익을 만드세요. 진료시 보철물과 덴처의 세척을 수작업이 아닌 자동 장비를 사용한다는 것은 효율성을 높이면서 고품질의 결과를 이루어낼 수 있다는 의미입니다.



Renfert

WORKFLOW GUARANTEE

3 year guarantee
10 year spare parts service
Activity guarantee

www.renfert.com